


# CATGUT

## CHROM

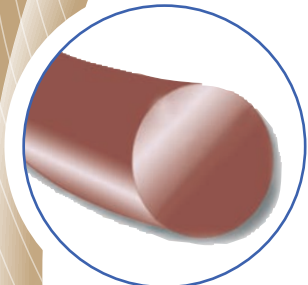

<b>Type</b>	Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament
<b>Composition</b>	Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés tanné avec des sels de chrome (originaire de pays réputés exempts d'ESB)
<b>Enduit</b>	Aucun
<b>Couleur</b>	Brun foncé
<b>Réaction tissulaire</b>	Modérée
<b>Résorption</b>	Par phagocytose. La résorption est ralentie par le chrome. Résorption totale du fil endéans les 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 14 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac).
<b>Présentation</b>	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité  
&  
sécurité*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# CATGUT

CHROM

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée
- ✓ Résorption par phagocytose
- ✓ Structure tordue
  
- ✓ Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

**INDICATIONS**    Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement    Chirurgie générale  
Chirurgie gastro-intestinale  
Gynécologie  
Obstétrique  
Urologie  
Chirurgie ophtalmologique

## AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds
  
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Excellente attache des noeuds
  
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

**CONTRE-INDICATIONS**    Chirurgie cardiovasculaire  
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)


Plaies infectées



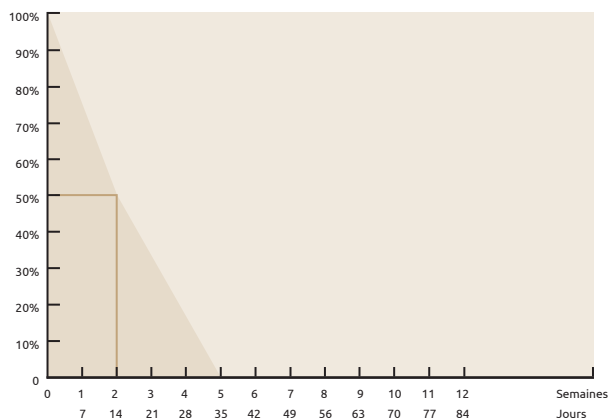

Sensibilisation ou allergie connue au collagène ou au chrome

## RÉSISTANCE À LA TRACTION

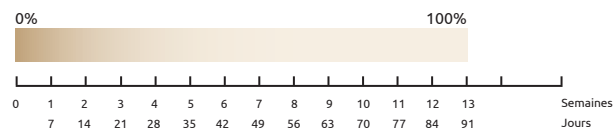







## RÉSORPTION



aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence	
<b>1/2 cercle</b> 	HR 15 mm		1	6/0	75 cm	<i>brun</i>	2100115
			1.5	5/0	75 cm	<i>brun</i>	2150115
			2	4/0	75 cm	<i>brun</i>	2200115
	HR 20 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brun</i>	2150120
			2	4/0	75 cm	<i>brun</i>	2200120
			3	3/0	75 cm	<i>brun</i>	2300120
			3.5	2/0	75 cm	<i>brun</i>	2350120

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence		
<b>3/8 cercle</b> 	DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>brun</i>	2101512	
			1.5	5/0	45 cm	<i>brun</i>	2151512	
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brun</i>	2151516	
			2	4/0	75 cm	<i>brun</i>	2201516	
				3	3/0	75 cm	<i>brun</i>	2301516
	DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brun</i>	2151519	
			2	4/0	75 cm	<i>brun</i>	2201519	
			3	3/0	75 cm	<i>brun</i>	2301519	
				3.5	2/0	75 cm	<i>brun</i>	2351519
	DS 24 mm		2	4/0	75 cm	<i>brun</i>	2201524	
			3	3/0	75 cm	<i>brun</i>	2301524	
			3.5	2/0	75 cm	<i>brun</i>	2351524	