

CATGUT

PLAIN



| | |
|----------------------------|--|
| Type | Multifilament torsadé avec un aspect de monofilament |
| Composition | Tissu conjonctif purifié provenant de la membrane séreuse intestinale de bovins sélectionnés (originaire de pays réputés exempts d'ESB) |
| Enduit | Aucun |
| Couleur | Ivoire |
| Réaction tissulaire | Modérée |
| Résorption | Par phagocytose. Résorption totale du fil endéans les 63 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 7 jours. La résorption est plus rapide au niveau des tissus infectés et au niveau des sites présentant des taux d'enzymes protéolytiques élevés (vagin, col de l'utérus, estomac). |
| Présentation | Boîte de 12 pochettes |

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Résorption par phagocytose
- Structure tordue

- Diamètre uniforme par polissage "centerless" (apparence de monofilament)
- Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent
- Résorption uniforme
- Propriétés de manipulation excellentes
- Grande flexibilité
- Résistance à la traction élevée
- Excellente sécurité des noeuds

- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Excellente attache des noeuds

- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)


Plaies infectées

Sensibilisation ou allergie connue au collagène

RÉSISTANCE À LA TRACTION

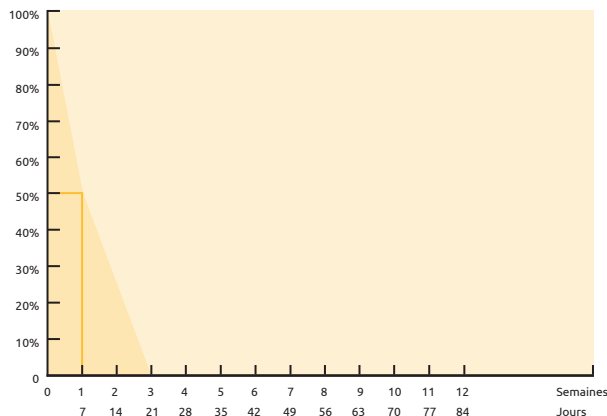



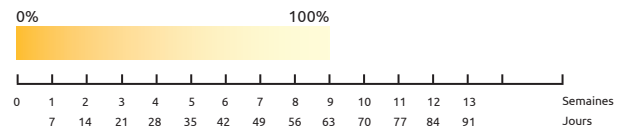







RÉSORPTION



CATGUT

PLAIN

| aiguille ronde | |  | metric | USP | longueur | | référence |
|---|----------|---|--------|-----|----------|---------------|-----------|
| 1/2 cercle  | HR 16 mm |  | 1.5 | 5/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1150116 |
| | | | 2 | 4/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1200116 |
| | HR 20 mm |  | 2 | 4/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1200120 |
| | | | 3 | 3/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1300120 |
| aiguille triangulaire | |  | metric | USP | longueur | | référence |
| 3/8 cercle  | DS 12 mm |  | 1.5 | 5/0 | 45 cm | <i>ivoire</i> | 1151512 |
| | | | 1 | 6/0 | 45 cm | <i>ivoire</i> | 1101516 |
| | DS 16 mm |  | 1.5 | 5/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1151516 |
| | | | 2 | 4/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1201516 |
| | | | 3 | 3/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1301516 |
| | DS 19 mm |  | 2 | 4/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1201519 |
| | | | 3 | 3/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1301519 |
| | | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1351519 |
| | DS 24 mm |  | 2 | 4/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1201524 |
| | | | 3 | 3/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1301524 |
| | | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | <i>ivoire</i> | 1351524 |