



SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

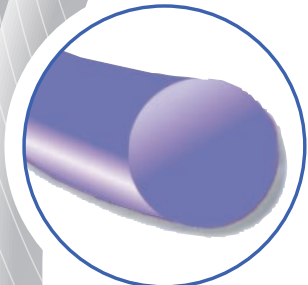

Type	Monofilament
Composition	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
Enduit	Aucun
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 42 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes

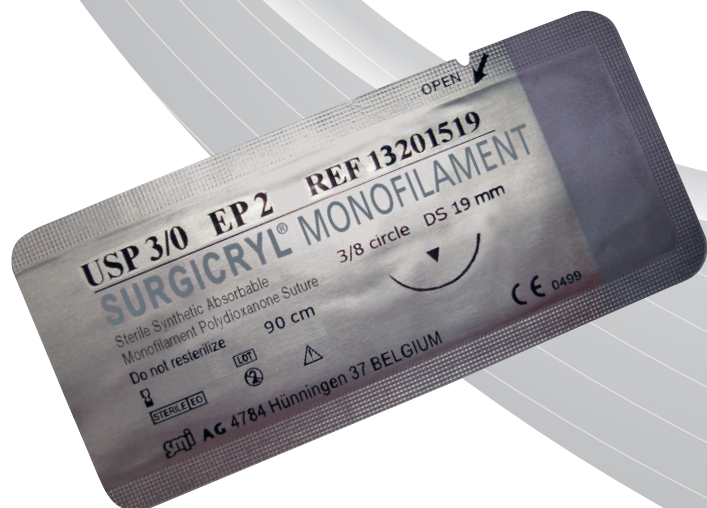

Pour qualité
&
sécurité

www.sutures.be

SURGICRYL® MONOFILAMENT POLYDIOXANONE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée et durable
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- Pliabilité et souplesse
- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général spécialement

Chirurgie générale
Chirurgie gastro-intestinale
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique
Fermeture de la paroi abdominale
Gynécologie
Chirurgie plastique
Urologie

AVANTAGES


- Persistence exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Prothèses

Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis



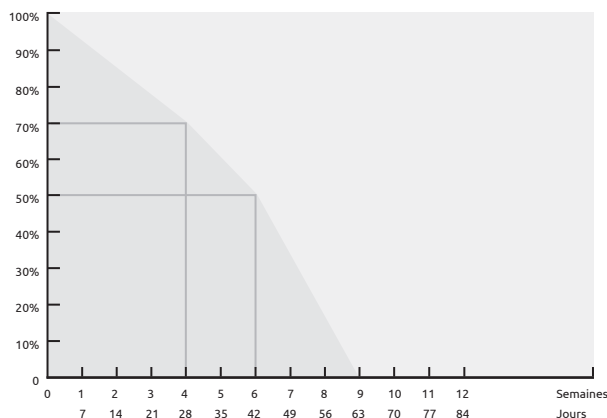


À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).










RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100113
	HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 13070117
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13200122

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 13071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151512
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151516
	DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101519
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101519-75
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201519
	DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>violet</i> 13101516P
	DS 19 mm noir		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519VB
	DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151524
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201524
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301524